

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [lab.pro-solution.ru](http://lab.pro-solution.ru) | эл. почта: [ipi@pro-solution.ru](mailto:ipi@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Суховоздушный стерилизатор ГП-20 СПУ



Назначение: для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей, материалов.

Применение: в лечебно-профилактических учреждениях, станциях переливания крови, стоматологических клиниках, аптеках, косметологических кабинетах, парикмахерских, лабораториях химической промышленности, пищевой, в других отраслях промышленности, бытовых учреждениях, лабораториях предприятий коммунальной сферы.

Выпускаются в двух вариантах исполнения: без охлаждения (2 цикла стерилизации за рабочую смену) и с дополнительным принудительным охлаждением (4 цикла стерилизации за рабочую смену).

Особенностью стерилизаторов, исполненных в варианте с принудительным охлаждением, является наличие эффективной системы принудительного охлаждения, что позволяет отказаться от подачи холодного воздуха к стерилизуемым материалам и применения бактерицидных фильтров, что сокращает время стерилизации почти в два раза.

Время охлаждения загруженного стерилизатора с принудительным охлаждением до +60°C - не более 30 мин.

### **Особенности:**

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры режима;
- автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- автоматический запуск рабочей программы в заданное время (дополнительно, по желанию заказчика);
- быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха;
- цифровая индикация текущей и заданной температуры.

### **Технические характеристики:**

Объем рабочей камеры, л 20

### **Режимы работы стерилизатора:**

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Дезинфекция: температура, °C               | 120      |
| время, мин                                 | 45       |
| Стерилизация I: температура, °C            | 180      |
| время, мин                                 | 60       |
| Стерилизация II: температура, °C           | 160      |
| время, мин                                 | 150      |
| Дополнительный режим: температура, °C      | 50...200 |
| время, мин                                 | 1...999  |
| Наличие системы принудительного охлаждения | есть     |

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Аварийное отключение от электрической сети при перегреве в камере, °С, не более       | 235         |
| Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере, °С, не более | ±3          |
| Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более          | 55          |
| Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры 60°С, мин, не более        | 40          |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее (ширина x глубина x высота):                     | 333x215x277 |
| Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более (ширина x глубина x высота):           | 625x475x416 |
| Масса, кг, не более                                                                   | 32          |
| Потребляемая мощность, кВт, не более                                                  | 1,5         |
| Питание                                                                               | 220В/50Гц   |

### **Комплектация:**

напольная подставка (по желанию заказчика).

### **Характеристики**

Бренд: ЛОиП